
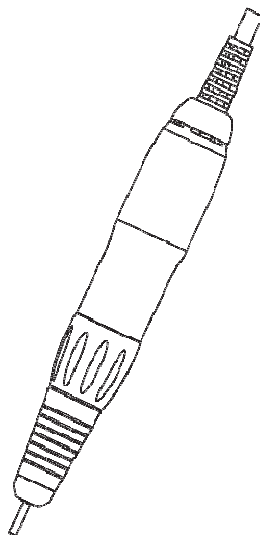


Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

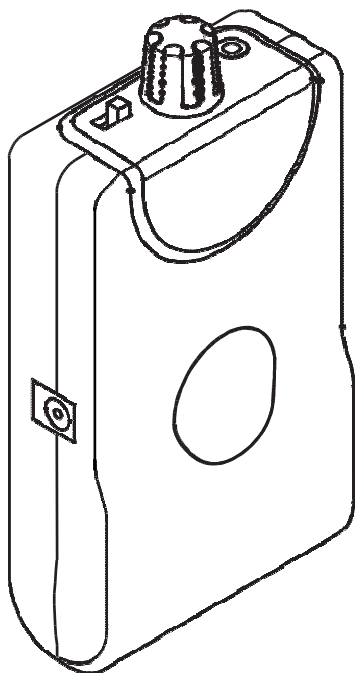

Afin d'éviter les blessures aux personnes et les dommages au produit, assurez-vous d'avoir lu le mode d'emploi dans son intégralité avant toute utilisation. Veuillez conserver ce mode d'emploi dans un endroit où il peut être consulté à tout moment par tous les utilisateurs.

Simon Keller SA décline toute responsabilité pour des dommages provoqués par les causes suivantes:

- | Dans le cas où l'utilisateur ne suit pas les instructions du mode d'emploi
- | Dans le cas de facteurs externes, tels qu'une mauvaise installation
- | Dans le cas d'une utilisation incorrecte ou excessive
- | Dans le cas d'une réparation, qui n'a pas été effectuée par une personne certifiée.

Contenu

FRANÇAIS

- 1. Composantes du produit 4
 - 1.1 Composantes du produit

- 2. Domaines d'utilisation..... 5
 - 2.1 Pour une utilisation mobile
 - 2.2 En tant que modèle de table

- 3. Utilisation..... 6
 - 3.1 Fonctions d'utilisation
 - 3.2 Descriptifs des voyants LED
 - 3.3 Fonction de «protection contre les surcharges»

- 4. Batterie 7
 - 4.1 Recharge de la batterie
 - 4.2 Remplacement de la batterie

- 5. Maintenance..... 9
 - 5.1 Changement d'instrument / tige de vérification
 - 5.2 Changement du roulement à billes
 - 5.3 Changement de la brosse carbone
 - 5.4 Changement de la pince de serrage
 - 5.5 Vue éclatée de la pièce à main

- 6. Données techniques 12


- 7. Consignes de sécurité. 13

1. Composantes du produit

1.1 Composantes du produit

Vérifiez si le contenu livré est complet.
Assurez-vous que les composantes suivantes sont incluses:

Unité de commande

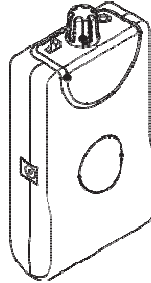


Pièce à main




| Pièce à main contenue dans un seul produit

Accessoires

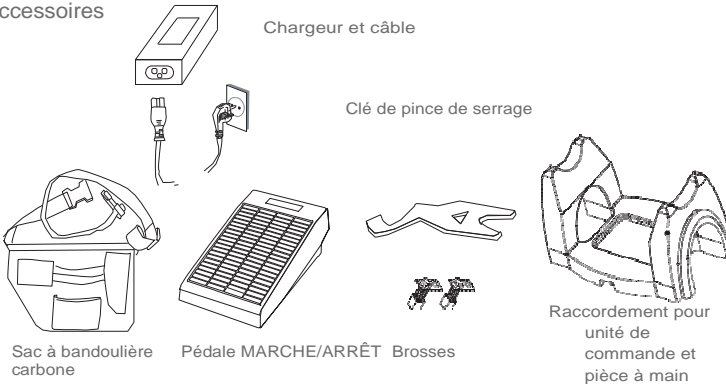

2. Domaines d'utilisation

2.1 Pour une utilisation mobile

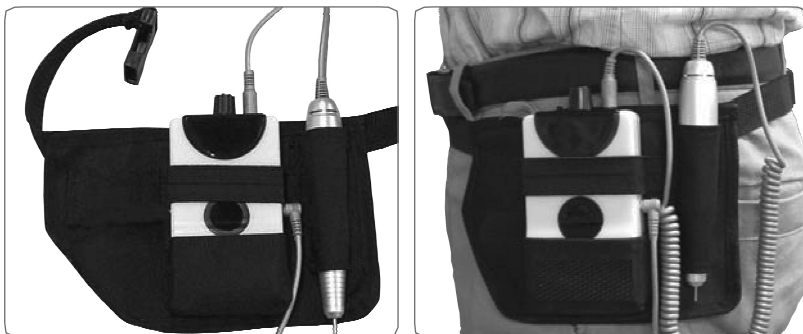


2.2 En tant que modèle de table




3. Utilisation

3.1 Fonctions d'utilisation

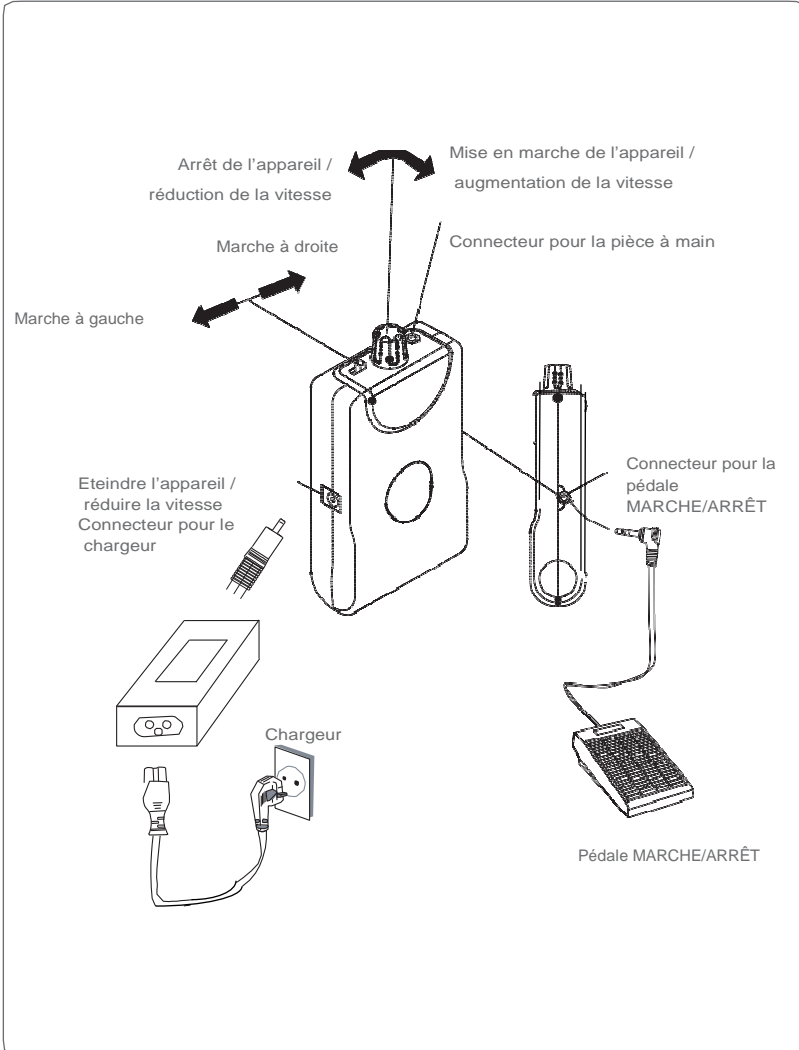

FRANÇAIS

3.2 Descriptifs des voyants LED

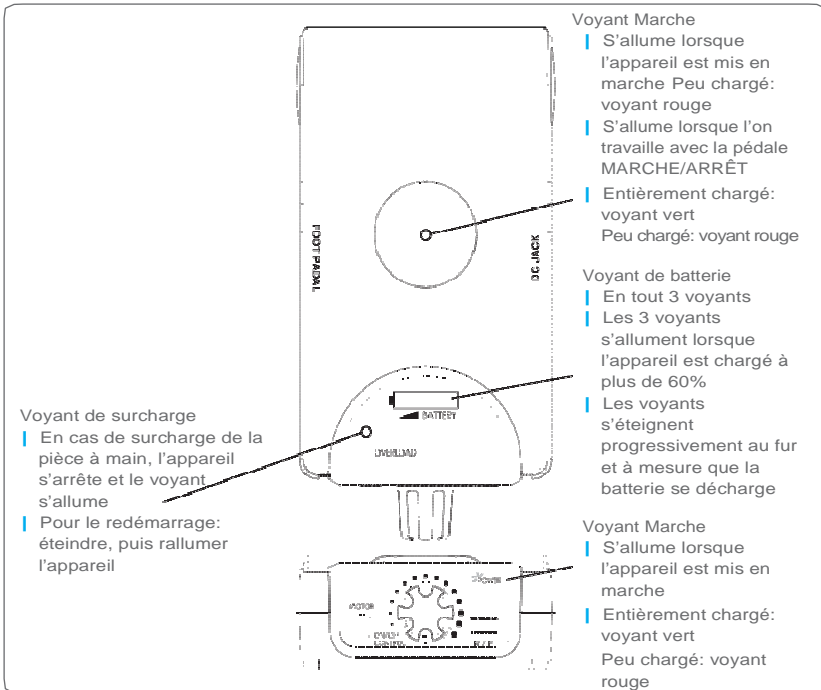

3.3 Fonction de «protection contre les surcharges»

Le voyant rouge s'allume lorsqu'une force excessive est exercée sur la pièce à main. Eteignez l'appareil, puis rallumez-le.

4. Batterie / accumulateur

La batterie intégrée dans l'unité de commande est une batterie polymère lithium-ion rechargeable.

4.1 Recharge de la batterie

- Lorsque le voyant rouge s'allume sur la batterie, veuillez recharger la batterie.
- Branchez le chargeur comme indiqué sur l'image de la page 6.
- Pour charger la batterie, veuillez suivre les instructions suivantes:

Conditions d'utilisation lors de la recharge

- | La température doit être comprise entre 0 et 40 °C
- | Procéder à la recharge dans une pièce bien aérée
- | Ne pas recharger la batterie à proximité de matériaux inflammables tels que l'essence.

Autres


- | Ne pas placer d'objets sur ou à l'intérieur de l'unité de commande
- | Brancher uniquement le chargeur fourni avec l'appareil
- | Ne pas démonter la batterie vous-même

4.2 Remplacement de la batterie

Les batteries rechargeables doivent être remplacées au bout d'un certain temps. Leur durée de vie est en effet limitée.

La batterie ne doit pas être remplacée par le client. Ce travail doit être effectué que par un centre de service agréé. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service client du fournisseur chez qui vous avez acheté l'appareil.

ATTENTION: veuillez débrancher l'appareil du secteur!

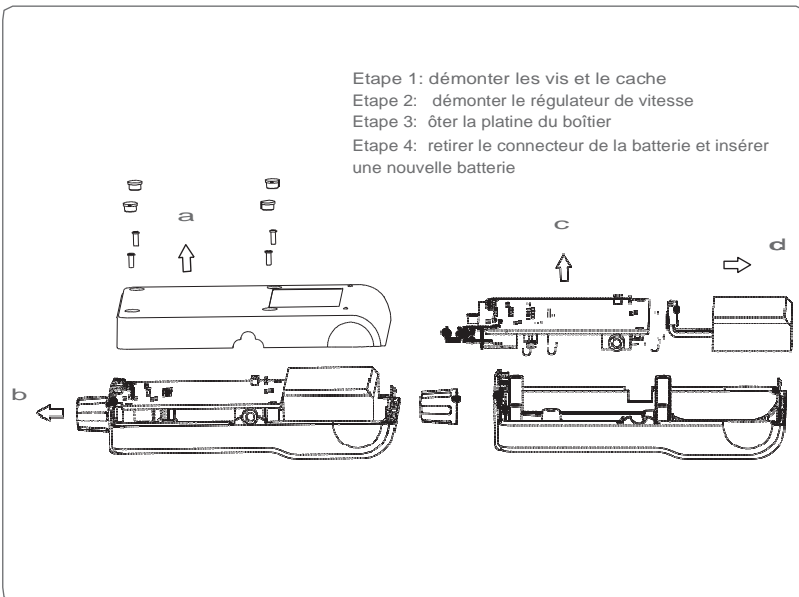


5. Maintenance



Les instructions de maintenance ci-dessous sont exclusivement destinées au centre de service agréé. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service client/le fournisseur spécialisé chez qui vous avez acheté l'appareil.

5.1 Changement d'instrument


Changement d'instrument

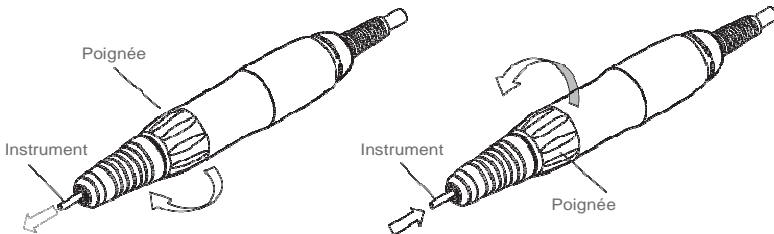


AVERTISSEMENT

- | Avant l'insertion, veuillez vérifier l'état de l'instrument. Ne pas utiliser d'instruments endommagés, tordus ou fissurés.
- | Avant l'insertion, assurez-vous que la pièce à main est complètement éteinte.
- | Après l'insertion, assurez-vous que la pince de serrage est bien serrée. Il est très dangereux d'utiliser l'appareil si la pince de serrage n'est pas complètement serrée.


5.2 Changement du roulement à billes

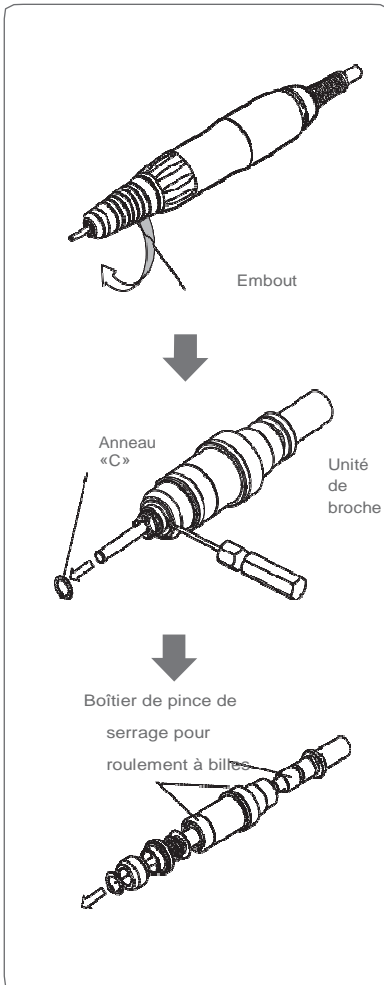

5.3 Changement de la brosse carbone

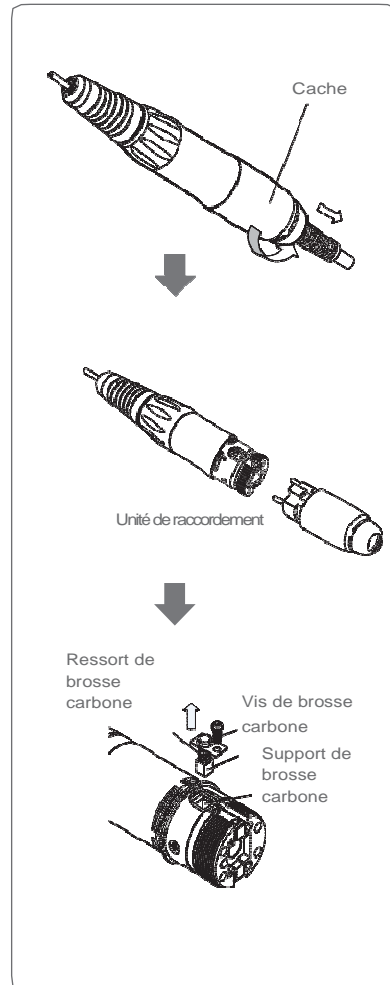

5.4 Changement de la pince de serrage

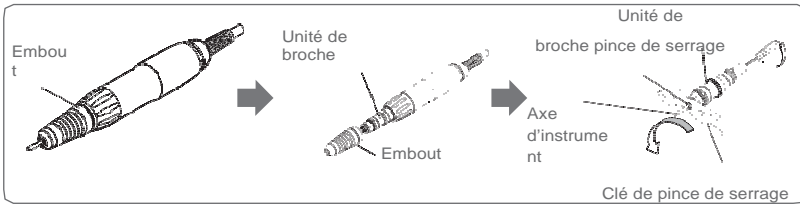

5.5 Vue d'assemblage de la pièce à main



Numéro de pièce

Liste de			
N°	NOM	Pcs.	P/B
1	NOSE CAP	1	
2	HAND CAP	1	
3	C-SNAPRING	1	
4	INNER DIA COLLAR	1	
5	OUT DIA COLLAR	1	
6	WAVE WASHER	1	
7	FLAT WASHER	1	
8	BALL BEARING	1	
9	BUSH	1	
10	BALL BEARING	1	
11	WASHER	1	
12	SPRING CASE	1	
13	COIL SPRING	1	
14	TEST BAR	1	
15	COLLET CHUCK	1	
16	COLLET CHUCK CASE	1	
17	COLLET CHUCK SPRING	1	
18	COLLET CHUCK JOING	1	
19	COIL SPRING	1	
20	DELRIN JOINT	1	
21	BALL GUIDE INNER	1	
22	HANDLE CAM	1	
23	BALL	2	
24	BALL RIM	2	
25	HANDLE	1	
26	BALL GUIDE OUTER	1	
27	BALL GUIDE PIN	1	
28	COIL SPRING	1	
29	O-RING	1	
30	MOTOR CASE	1	
31	FLAT HEAD BOLT	4	
32	NO BOND MAGNET	1	
33	BALL BEARING	1	
34	WASHER	2	
35	ARMATURE ASSY	1	
36	BALL BEARING	1	
37	BRUSH HOLDER ASSY	1	
38	CARBON ASSY	2	
39	CONNECTOR	2	
40	FLAT WASHER	1	
41	O-RING	1	
42	CONTROL BOLT	1	
43	CORD ASSY	1	
44	CAP	1	

La qualité des produits peut être améliorée et les spécifications des produits ainsi que le design peuvent être modifiés sans préavis. Toutefois, une révision ne peut pas être exigée.

6. Données techniques

FRANÇAIS

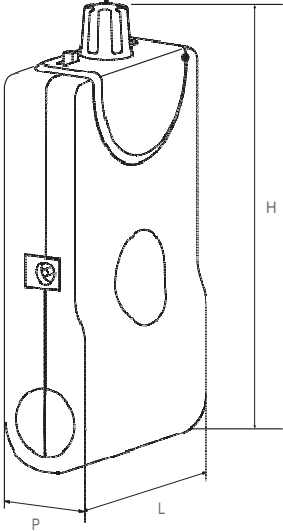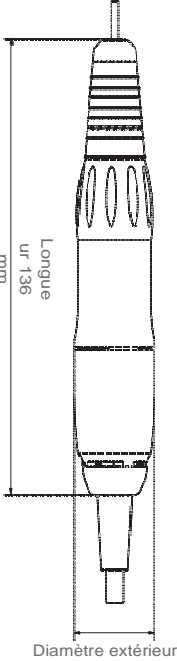	
<ul style="list-style-type: none"> Dimensions (LxPxH) en mm: 67x30x132 Poids: 185 g Chargeur – Tension d'entrée AC110 – 230 V, 50/60 Hz Tension de sortie: DC 13 V Temps de charge: 2 h 30 min Durée de fonctionnement A vitesse maximale: 5 heures A 10 000 tr/min.: 8,5 à 9 heures 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensions Diamètre extérieur \varnothing 24 mm, longueur: 136 mm Poids: 120 g (sans câble: 60 g) Nombre de tours 0–24 000 tr/min. (DC 13 V, 1.2 A) Diamètre de serrage: \varnothing 2,35 mm

7. Consignes de sécurité

7.1 Conditions d'utilisation

- | Température: +0 °C – +40 °C
- | Humidité: 35%–70%
- | Pression: moins de 1060 hPa
- | A utiliser dans une pièce bien aérée, loin de tous matériaux inflammables tels que l'essence
- | A utiliser uniquement en présence d'un personnel qualifié

7.2 Attention

- | Pendant toute la durée d'utilisation, veuillez penser avant tout à la sécurité du client.
- | Lorsque vous sortez le produit de son emballage, assurez-vous qu'il ne puisse pas tomber.
- | Afin d'éviter une décharge électrique ou un accident similaire, veuillez ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées.
- | Si le câble est défectueux, veuillez ne pas utiliser l'appareil. Remplacez le câble
- | Ne branchez pas plus de deux câbles d'alimentation dans une prise de courant.
- | Pour éviter tout risque de court-circuit, d'électrocution et d'incendie, veuillez ne pas endommager le câble moteur.
- | Veuillez vérifier si le produit est complet avant de l'utiliser. Si vous constatez un état de montage inhabituel, des vibrations de la pièce à main, des bruits ou une température inhabituels, éteignez immédiatement l'appareil et signalez-le au fournisseur spécialisé chez qui vous avez acheté l'appareil.
- | Ne pas encombrer l'ouverture de ventilation.
- | Ne pas souffler d'air comprimé dans l'ouverture de ventilation.
- | Veuillez toujours éteindre complètement l'appareil lorsque vous quittez le poste de travail.

- | Le contact avec la peau peut provoquer des éruptions cutanées et des réactions allergiques, surtout chez les clients sensibles. Dans ce cas, n'utilisez plus l'appareil et contactez un dermatologue.
- | Veuillez ne pas démonter l'appareil vous-même ou y apporter des modifications.
Il se pourrait que la performance et la sécurité d'origine ne soient plus garanties.
- | Assurez-vous que la pièce à main ne puisse pas tomber.
Certaines parties de la pièce à main sont sensibles aux vibrations, pouvant entraîner un dysfonctionnement.
- | Evitez impérativement que de l'huile ou de l'eau pénètre dans la pièce à main et l'unité de contrôle.
- | Veuillez ne pas utiliser d'huile pour nettoyer la pièce à main.
Cela pourrait endommager le roulement.
- | Après utilisation, laissez la fraise ou la tige de vérification dans la pièce à main.
- | Veuillez utiliser exclusivement des instruments avec un diamètre de tige de 2,35 mm, satisfaisant à la norme ISO. Evitez d'utiliser des instruments tordus.
- | Respectez impérativement la vitesse autorisée selon la taille de l'instrument.
- | Veuillez ne pas ouvrir la pince de serrage lorsque l'instrument tourne dans la pièce à main. Pour changer d'instrument, éteignez le moteur et attendez jusqu'à ce que la rotation s'arrête.
- | Pour l'élimination de la batterie, veuillez respecter les directives nationales.
- | En raison du risque élevé d'explosion, ne jamais exposer la batterie au feu ou à d'autres sources de chaleur.
- | En cas de contact de substances chimiques contenues dans la batterie avec la peau ou les yeux, rincer abondamment et consulter immédiatement un médecin.

Garantie

PRODUIT	
Modèle	
N° de série	
Date d'achat	
ACHETEUR	
Institut	
Adresse	
Tél.	
E-mail	

- | La garantie de ce produit est de 12 mois à compter de la date d'achat. Les pièces d'usure sont exclues de la garantie.
- | Tout matériel défectueux sera réparé immédiatement et sans frais.
- | Si des défauts surviennent pendant la période de garantie, vous pouvez demander une réparation en spécifiant les défauts au dos de la carte de garantie.
- | Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une manipulation ou une installation incorrecte ou inadéquate, une utilisation excessive et des réparations effectuées par des personnes ou distributeurs non agréés.
- | Nous déclinons toute responsabilité pour des défauts résultant de l'usure générale.
- | Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par la négligence de l'utilisateur.
- | Cette garantie de produit est uniquement valable pour l'acheteur initial (l'institut).
- | Veuillez conserver la facture qui vous a été remise lors de l'achat du produit.
- | Pendant la période de garantie, l'acheteur doit assumer les coûts de retour.

