

Keller

Bedienungsanleitung



Serie 674

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben und danken für Ihr Vertrauen.

Bitte beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Hinweise und halten Sie diese Anleitung für alle Benutzer verfügbar!

Der Kompressenwärmer ist vielseitig verwendbar und kann für folgende Produkte eingesetzt werden:

- Moorpackungen
- Hot-Stone's
- Kräuterstempelkissen
- Paraffin-Kompressen

Bei erstmaliger Benutzung kann eine leichte Geruchsentwicklung auftreten, die sich jedoch nach kurzer Betriebsdauer verliert.

Für Ihre Sicherheit

- Überprüfen Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Nur an Wechselstrom anschliessen.
- Gerät wird bei Benutzung heiss, daher nur an den isolierten Griffen anfassen und nur in kaltem Zustand transportieren!
- Kabel von heissem Gerät fernhalten, es muss bei Betrieb vollständig abgewickelt sein.
- Gerät auf eine stabile, ebene und freie Fläche stellen, nicht auf heisse Oberflächen oder in die Nähe von anderen Wärmequellen.
- Sollte Ihr Gerät einmal leer kochen, verhindert ein Trockengehschutz die Überhitzung.
- Gerät immer gut abkühlen lassen bevor neues Wasser eingefüllt wird, sonst besteht Verbrühungsgefahr durch Dampfbildung und die Emailoberfläche kann beschädigt werden.
- Bei Beschädigung am Gerät oder der Anschlussleitung, bei Störung, vor jeder Reinigung und nach jedem Gebrauch immer den **Netzstecker ziehen**.

Reparatur und Wartung

- Unsere Elektrogeräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von Fachkräften oder durch unseren Werkkundendienst durchgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können die Benutzer gefährden. Unsachgemässer Gebrauch und Missachtung der Bedienungsanleitung führen zum Verlust des Garantieanspruchs.
Bitte wenden Sie sich an unsere Service-Abteilung, Telefon 034 420 08 03.

Wichtige Hinweise zum Gebrauch des Gerätes

- Der Wasserbehälter fasst 29 Liter und muss zur Reinigung vor dem ersten Gebrauch mit ca. 5 Liter Wasser ausgekocht werden, dabei Temperaturwähler auf „permanent“ stellen.
- Vor dem Einschalten immer Wasser einfüllen. **Achtung:** durch Überfüllung kann heisses Wasser heraus spritzen, daher maximal bis 4 cm unterhalb des Behälterrandes befüllen.
- **Vorsicht:** Durch austretenden Dampf besteht Verbrühungsgefahr.

Temperaturregelung / Thermostateinstellung

- Die Temperatur ist mittels Präzisions-Thermostat (Kapillarrohr-Regler) stufenlos von 30°C bis 100°C einstellbar und wird automatisch geregelt. Kein zusätzliches Thermometer erforderlich !
- Am Ende der Betriebszeit und bei Betriebsunterbrechung den Temperaturwähler zurück auf „0“ stellen und den Netzstecker ziehen.

Reinigen

- Das Gerät nie in Wasser tauchen, schützen Sie auch die Zuleitung vor Feuchtigkeit.
- Innen und aussen mit feuchtem Lappen reinigen. Eventuelle Kalkrückstände mit Essigwasser beseitigen und anschliessend mit klarem Wasser auskochen.

Arbeitsabfolge

- Drahteinlage einsetzen und Wasser einfüllen
- Wärmekompressen, Hot-Stone's etc. ins Wasser legen
- **Bei den Kräuterstempelkissen darf das Wasser nur bis knapp unterhalb des Einsatzgitters reichen.**
- Deckel aufsetzen und Netzstecker in die Steckdose stecken
- Temperatur wählen
- Hot-Stone's bei 50°C, Kompressen bei 60-70°C und die Kräuterstempelkissen bei ca. 90-100°C (damit Dampf entsteht)
- Die Kontroll-Lampe leuchtet, das Gerät heizt
- Erstes Erlöschen der Kontroll-Lampe bedeutet, dass die gewählte Temperatur erreicht ist. Diese wird dann automatisch gehalten.
- Nach Beendigung der Behandlungen und Gebrauchs des Kompressenwärmers den Temperaturwähler auf „0“ stellen und den Netzstecker herausziehen.